

Anpassung der Konfigurationseinstellung am Medumat Standard² & Änderung Verfahrensanweisung bei Einweg – Beatmungsschläuchen

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,


die nachfolgende RD-Info beinhaltet zwei Bekanntgaben:

Die Anpassung der Konfigurationseinstellungen am Medumat Standard² für alle im Rettungsdienst der Stadt Bielefeld beteiligten Organisationen und eine Änderung der Verfahrensanweisung zur Nutzung von Einweg-Beatmungsschläuchen beim Medumat Transport und dem Medumat Standard² für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Bielefeld.

1. Anpassung der Konfigurationseinstellungen am Medumat Standard²

Im Rahmen der RDF 2017 wurde der neue CPR- Algorithmus bislang auf 14 Veranstaltungen geschult und zertifiziert. Damit verbunden ergeben sich einige Änderungen in der Konfiguration des Beatmungsgerätes am Medumat Standard².

Nachdem starten des Gerätes müssen im CPR-Modus keine Parameter manuell mehr angepasst werden, da diese durch ein Konfigurationsupdate für die Beatmung von Kleinkindern, Kindern und Erwachsenen bereits voreingestellt sind.

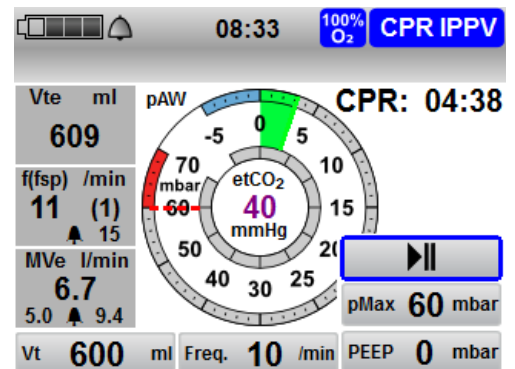

Auf der nachfolgenden Tabelle sind die angepassten Konfigurationseinstellungen für den CPR-Modus aufgeführt:

	Kleinkind	Kind	Erwachsener
Vt	75ml	150ml	600ml
AF	20/min.	15/min.	10/min.
PEEP	0mbar	0mbar	0mbar
pMax	25mbar	25mbar	30mbar
CPR pMax	60mbar	60mbar	60mbar
FiO ₂	1,0	1,0	1,0
HDM: Beatmung		15:2	30:2

Die Umsetzung zur Änderungen der Konfigurationseinstellungen am Medumat Standard² obliegt allen am Rettungsdienst beteiligter Organisationen. Diese Maßnahme soll aber nach Inkrafttreten der RD-Info 5.13.1 in Kürze durchgeführt werden.

Zuständige Org.-Einheit: Stadt Bielefeld – Feuerwehramt Abt. Einsatz – Rettungsdienst 370.13 Am Stadtholz 18, 33609 Bielefeld	Verantwortlich: Jörn Bielinski Thomas Epp Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	Telefon: 0521 / 51 – 2317 0521 / 51 – 3932 0521 / 51 – 6127 Fax.: 0521 / 51 - 8065	e-mail: Joern.bielinski@bielefeld.de Thomas.epp@bielefeld.de Aelrd@bielefeld.de	Datum: 12.07.2017
--	---	--	--	-----------------------------

2. Änderung der Verfahrensanweisung zur Nutzung von Einweg-Beatmungsschläuchen beim Medumat Transport und Medumat Standard² für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Bielefeld.

Für den Betrieb der Weinmann Beatmungsgeräte Medumat Transport und Medumat Standard² werden ab sofort nach jedem Patientenkontakt die Einweg-Beatmungsschläuche getauscht. Der verpflichtende Schlauchwechsel am Montag, wie in der RD-Info 5.13 vom 15.07.2013 beschrieben, entfällt ab sofort.

Ungeachtet der Änderung dieser Maßnahme bleiben folgende Einsatzgrundsätze erhalten:

- Bei jeder Beatmung eines Patienten wird ein Atemfiltersystem Typ ISO Gard HEPA Small S genutzt.
- Desinfizierende Reinigung aller Handkontaktflächen am Beatmungsgerät nach jedem Einsatz (die übliche Transportabschlussdesinfektion beim Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft)
- Sorgfältige Händehygiene (z.B. auch die Händedesinfektion nach Ablegen der Einmalhandschuhe)



Eine Dokumentation des durchgeführten Schlauchwechsels im morgendlichen Checkprotokoll des Fahrzeuges ist nicht mehr erforderlich. Dieses wird entsprechend angepasst.

Altbestände von Checkprotokollen bitte aufbrauchen.

I.A.
Jens Schubert

Verteiler:

Info-Ordner 370.13	Aushang Hauptwache	Amtsleitung Herr Kleibrink
Info-Ordner LST	Aushang LST	Abt.-Ltr. 370.1
Info-Ordner Transporteurzimmer	Aushang Transporteurzimmer	Abt. 370.33 Ausbildung
Info-Ordner Wache West	Aushang Wache West	A-/B-/C-Dienst
Info-Ordner Wache Süd	Aushang Wache Süd	Alle Mitarbeiter 370 per Mail
Info-Ordner Wache Nord	Aushang Wache Nord	ASB DRK JUH RD Bielefeld gGmbH
Info-Ordner RTH	Aushang RTH	Biekra
Info-Ordner NEF-Mitte	Aushang NEF-Mitte	URK Haupt
	Leiter Med.-GW	ÄLRD
		Notärzte