

Allgemeiner Desinfektionsplan

URK Haupt Krankentransporte Bielefeld

Stand: Juli 2010

Was	Wann, wie oft	Wie	Womit	Wer
Trage Tragestuhl	Nach Verschmutzung und bei der wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion	desinfizierend Abwischen	Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1 Std.	Rettungsanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
Wände Decken Fußboden Materialschränke Tragetisch Wandhalterungen	Nach Verschmutzung und Kontamination sofort sowie bei der wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion	desinfizierend Abwischen	Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1 Std.	Rettungsanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
Notfallkoffer Schaufeltrage Vakuumschienen Kammerschienen Vakuummattatze	Nach dem Einsatz und bei der wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion	desinfizierend Abwischen	Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1 Std.	Rettungsanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
Stethoskop Blutdruckmessgerät Staubbinde Infusionspumpe Spritzenpumpe Pulsoximeter EKG / Defibrillator Respirator Absaugpumpe Laryngoskopgriff	Nach Gebrauch sofort und bei der wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion	desinfizierend Abwischen	Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1 Std.	Rettungsanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
Flächendesinfektion ⇒ nach Transport meldepflichtiger Krankheiten ⇒ nach Transport von Patienten mit Noro-Viren MRSA/VRE/ESBL	Sofort nach Transport Sofort nach Transport Sofort nach Transport	Scheuerdesinfektion gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz Eigenschutz Beachten Wischdesinfektion Wischdesinfektion	Vorgabe Gesundheitsamt siehe auch speziellen Desinfektionsplan Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N [®] 1% - 2 Stunden Kontaktfläche 2%-5 Minuten Fahrzeug 0,5% - 1 Stunde	Rettungsanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten Hygienefachkraft im RD Rettungsanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
<u>Instrumente:</u> Magillzange Klemmen Guedeltuben Wendeltuben Mundkeil Beatmungsmasken Peep – Ventil Laryngoskopspatel Führungsstäbe Patientenventil Beatmungsschlauch	nach Gebrauch	Erst desinfizieren, dann reinigen! gebrauchte Instrumente in die Instrumenten- Desinfektionswanne einlegen, Schlauchsysteme mit Lösung füllen, Einwirkzeit beachten Nach Desinfektion Instrumente mit Leitungswasser abspülen und trocknen lassen. Vor Montage die Hände desinfizieren!	Instrumenten- desinfektionsmittel Desomedan ID [®] 2% - 30 Min.	Rettungsanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten

Lutz Cierpka
Geschäftsführer

Michael Dräger, DEAA
Ärztlicher Leiter

Allgemeiner Desinfektionsplan

URK Haupt Krankentransporte Bielefeld

Stand: Juli 2010

Was	Wann, wie oft	Wie	Womit	Wer
Hygienische Händedesinfektion	Vor Arbeitsbeginn, vor und nach Patientenkontakt, nach Kontakt mit kontaminierten Material, nach Toilettenbenutzung, bei Dienstschluss	Desinfektionsmittel aus Wandspender entnehmen 3 ml Konzentrat 30 sek. in die trockenen Hände einreiben	Hände-Desinfektionsmittel Aseptoman® 3 ml – 30 sek. Sterillium Virugard® 3 ml – 30 sek. (gegen Noro-Virus)	Rettungssanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
Händewaschung	Nach Verschmutzung, nach Toilettengang, nach dem Einsatz, vor Mahlzeiten	Seife nur aus Spendern, nur Einmalhandtücher	Flüssigseife aus Spendern	Rettungssanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
Händepflege	Mehrmals täglich	Hautschutzlotion in die Hände einreiben	Hautschutzlotion aus Spendern	Rettungssanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
Hautdesinfektion	vor Injektionen, vor Punktionen, vor chirurgischen Eingriffen	Hautdesinfektionsmittel aufbringen (Spray) Hautstelle vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nur sterile Tupfer verwenden	Haut-Desinfektionsmittel Cutasept F® 15 – 30 sek.	Rettungssanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
Einmalhandschuhe	vor jedem Patientenkontakt	Anziehen und bei Beschädigung wechseln		Rettungssanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
Mundschutz Augenschutz	Bei Spritzgefahr von Blut, Sekreten, bei bestimmten Infektionspatienten	selbst anlegen evtl. Patienten anlegen		Rettungssanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
Dienstbekleidung	Wechseln nach grober Verschmutzung und nach Dienstende	wechseln		Rettungssanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
Einmalmaterial: Spritzen Tupfer Kompressen Handschuhe Sauerstoffsonden	Im Einsatz Nach dem Einsatz, bzw. nach Dienstende	In flüssigkeitsdichte Abfallbeutel abwerfen Abfälle in den Hausmüll entsorgen		Rettungssanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
scharfer und spitzer Abfall	Sofort nach Gebrauch ⇨ 2/3 volle Behälter ⇨	In durchstichsichere Behälter abwerfen Geschlossen im Hausmüll entsorgen		Rettungssanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten
Putzutensilien	Nach Gebrauch	Einmaltücher entsorgen, mehrfach Putztücher desinfizierend auswaschen und trocknen		Rettungssanitäter Rettungsassistenten Lehrrettungsassistenten

Lutz Cierpka
Geschäftsführer

Michael Dräger, DEAA
Ärztlicher Leiter